


Interpretation des Testresultates vs Hämagglutinationshemmtest (HAH) Interprétation des résultats du test vs réaction d'inhibition de l'hémagglutination (IHA)

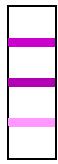

C2 +++ hoher Titer (HAH Titer über 1:640)
T Die Intensität der T Line ist stärker als diejenige der C2 Line. Das bedeutet einen
C1 hohen CPV Antikörpertiter dh. einen guten Immunstatus.

+++ titre élevé (titre IHA au dessus de 1:640)
La ligne T est plus intense que la ligne C 2. Celà correspond à un titre élevé d'anticorps CPV, càd un bon statut immunitaire.




C2 ++ mittlerer Titer (HAH Titer zwischen 1:80 und 1:320)
T Die Intensität der T Line liegt zwischen denen der C1 und der C2 Linien. Das
C1 bedeutet einen mässigen CPV Antikörpertiter, dh. einen guten Immunstatus.

++ titre moyen (titre IHA entre 1:80 et 1:320)
L'intensité de la ligne T se situe entre celle des lignes C1 et C2. Celà correspond à un titre moyen d'anticorps CPV, càd à un bon statut immunitaire.




C2 + tiefer Titer (HAH Titer unter 1:80)
T Die Intensität der T line ist schwächer als diejenige der C1 Linie. Das bedeutet
C1 einen tiefen CPV Antikörpertiter. Das bedeutet einen schwachen Immunstatus und verlangt eine Impfung innerhalb eines Monats.

+ bas titre (titre IHA moins de 1:80)
L'intensité de la ligne T est plus faible que celle de la ligne C1. Celà correspond à un faible titre d'anticorps CPV, càd à un faible statut immunitaire et exige une vaccination dans le mois à venir.

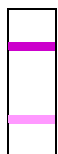

C2 **negativer Test**
T Nur die Kontrolllinien C1 und C2 sind auf der Testplatte sichtbar. Keine IgG
C1 Antikörper wurden nachgewiesen.

test négatif
Seules les lignes de contrôle C1 et C2 sont visibles sur la cellule-test. Aucun anticorps IgG n'a été dépisté.

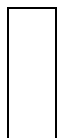

C2 **ungültiger Test**
T Die Kontrolllinien fehlen. (entweder zu wenig Probematerial oder falsche
C1 Handhabung). Test wiederholen mit neuer Testplatte.

test non valable
Les lignes de contrôle manquent (soit trop peu d'échantillon ou erreur de manipulation). Répéter le test avec une nouvelle cellule-test.



ARO VET AG
Veterinärmedizinische Präparate
Produits vétérinaires